

ASINSSPIEDIENA MĒRĪTĀJI ECB-1 ; ECB-2; ECB-3**1. Portatīvais asinsspiediena mērītājs ECB-1****Lietošanas instrukcija**

Atruna

Šī instrukcija un tajā aprakstītais produkts nav paredzēts kā padomu vai ieteikumu kopums, kas varētu aizstāt ārsta vai cits medicīnas darbinieka konsultāciju vai ieteikumus.

Šeit ietverto informāciju nevar izmantot veselības problēmu diagnosticēšanai vai ārstēšanai. Ja Jums ir aizdomas, ka Jums ir veselības problēmas, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu.

Portatīvā asinsspiediena mērītāja pielietošana

Ierīce ir paredzēta cilvēka sistoliskā asinsspiediena, diastoliskā asinsspiediena un sirdsdarbības ātruma mērīšanai uz plaukstas locītavas ar oscilometrisko mērīšanas metodi.

Šo produktu ir ieteicams lietot cilvēkiem, kas vecāki par 18 gadiem. Produkts ir paredzēts tikai mājas lietošanai.

Svarīgi, Lūdzu, izlasiet pirms asinsspiediena mērītāja lietošanas!

- Pirms asinsspiediena mērīšanas atpūties miera stāvoklī apmēram 5 līdz 10 minūtes.
- Lai asinsvadi atgrieztos iepriekšējā/normālā stāvoklī, atkārtotu mērījumu veiciet ne ātrāk kā pēc 3 līdz 5 minūtēm pēc iepriekšējā mērījuma veikšanas.
- Ja Jums ir kāda sirds-asinsvadu slimība, kā ateroskleroze, diabēts, aknu slimības, nieru slimības, smaga hipertoniya ..., lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu pirms lietojat šo ierīci.
- Ja tikko esat lietojis kofeīnu saturošus dzērienus vai smēķējis – nogaidiet 30 līdz 40 minūtes pirms veicat mērījumu.
- Asinsspiediena mērījumu rezultātus var interpretēt tikai kvalificēts ārsts, kas ir pazīstams ar Jūsu slimības vēsturi un veselības stāvokli.
- Kad lietojat asinsspiediena mērītāju Jūsu delnas locītavai ar asinsspiediena mērītāju ir jābūt tai pašā augstumā kā Jūsu sirdij. Aprocei ir jābūt stingri apliktai.
- Mērījuma laikā nekustiniet roku, uz kuras ir uzlikts asinsspiediena mērītājs.
- Asinsspiediena aproce ir jāliek uz kailas rokas, ja starp Jūsu roku in asinsspiediena mērītāju būs kāds apģērba gabals, mērījums būs nepareizs.
- Cilvēkiem ar asinsrites traucējumiem šis asinsspiediena mērītājs var uzrādīt zemākus lasījumus. Konsultējieties ar savu ārstu, lai noteiktu, vai asinsspiediena mērītāja lasījumi precīzi atspoguļo jūsu faktisko asinsspiedienu.

LCD displejā redzamo simbolu skaidrojums

Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu

Datuma un laika iestatīšana:

Pirms uzsākt mērījumu veikšanu un saglabāšanu, nepieciešams iestatīt pareizi laiku. Pārliedzieties, ka ierīce ir **IZSLĒGTA** pirms uzsākt datuma/laika iestatīšanu. Nospiediet pogu **SET**. Uz ekrāna uzrādīsies mirgojošs noklusējuma gads. Ar pogu **MEM** uzstādiat attiecīgo gadu un apstipriniet to nospiežot pogu **SET**. Atkārtojiet šo procesu ar mēnesi, datumu un diennakts laiku – stundas, minūtes.



Asinsspiediena rokas aproces uzlikšana




1. Asinsspiediena mērītājam ir jāatrodas plaukstu iekšpusē (zīm. 1.).
2. Plaukstu locītavai ir jābūt kailai
3. Pārliedzieties vai aproces mala ir apmēram 1 cm attālumā no plaukstu (zīm. 2.).
4. Uzliekot ierīci asinsspiediena mērītāja aproce nav stingri jānovelk (zīm. 3.).

Uzmanību! Nenostipriniet asinsspiediena mērītāja aproci pārlietu cieši.

Pareiza mērījuma pozīcija

1. Ir ļoti svarīgi, lai mērījuma veikšanas laikā asinsspiediena mērītājs atrastos vienā līmenī ar Jūsu sirdi. Ja asinsspiediena mērītājs būs augstāk vai zemāk, mērījums būs atšķirīgs no Jūsu patiesā asinsspiediena.
2. Nolieciet elkoni uz galda vai uz kā cita līdzīga un novietojiet roku kā parādīts zīmējumā pa labi.
3. Delnas iekšpusei ir jābūt vērstai uz augšu. Atslābiniet roku un veiciet mērījumu.

Asinsspiediena mērīšana

- Uzlieciet asinsspiediena mērītāju uz plaukstu locītavas, kā aprakstīts iepriekš.
- Apsēdieties pareizā mērījuma veikšanas pozīcijā, kā aprakstīts iepriekš.
- Nospiediet „” podziņu, lai sāktu mērījumu.
- Pēc tam, kad LCD displejā iedegsies visi simboli aproce automātiski piepildīsies ar gaisu un tiks uzsākts mērījums.
- Uz displeja Jums parādīsies Sistoliskais (augšējais) asinsspiediens, Diastoliskais (apakšējais) asinsspiediens un pulss.
- Šīs vērtības automātiski saglabāsies ierīces atmiņā.

Iepriekš veikto mērījumu rezultātu apskatīšana

- Pārliedzieties, ka ierīce ir izslēgta. Nospiediet „MEM” podziņu, lai izsauktu apskates režīmu.

Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu

- Spiežot pogu **MEM/SET** uzrādās divi skaitļi – augšējā vērtība ir attiecīgā mērījuma kārtas numurs; apakšējā vērtība ir kopējais atmiņā saglabāto mērījumu skaits.
- Nospiediet „START/STOP” podziņu, lai pārslēgtos uz pamata režīmu.


Saglabāto mērījumu izdzēšana

- Izņemiet baterijas no asinsspiediena mērītāja un visi dati no atmiņas tūlīt tiks izdzēsti.
- Lai pārbaudītu vai dati tiešām ir izdzēsti, ielieciet baterijas un nospiediet „MEM” podziņu – ja dati neparādās – tie ir veiksmīgi izdzēsti.

Bateriju maiņa

Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu, izņemiet vecās un ielieciet jaunas baterijas kā parādīts bateriju nodalījumā esošajā zīmējumā. Esiet uzmanīgi! Baterijas ir jāievieto pareizā polaritātē, citādi ierīce var tikt sabojāta.

LCD displejā redzamo simbolu apraksts

Simbols	Parādīšanās iemesls	Nepieciešamās darbības
Displejs paliek melns	Iekārta ir izslēgta. Baterijas ir pārāk tukšas. Baterijas ievietotas nepareizi.	Nomainiet abas baterijas. Pievērsiet uzmanību pareizai bateriju polaritātei.
	Parādās kad bateriju voltāža ir nepietiekama precīza mērījuma veikšanai	Nomainiet abas baterijas. Pievērsiet uzmanību pareizai bateriju polaritātei.
Er2; Er4	Mērījumu laikā Jūs runājat vai pārvietojaties.	Mērījumu veikšanas laikā sēdiet mierīgi, nerunājiet un neveiciet NEKĀDAS darbības.
Er2; Er10; Er30	Mērījumu laikā Jūs runājat vai pārvietojaties. Nepareizi uzlikta aproce. Roka netiek turēta sirds līmenī. Zem manžetes bija apģērbs/aproce.	Mērījumu veikšanas laikā sēdiet mierīgi, nerunājiet un neveiciet NEKĀDAS darbības. Veiciet ierīces atkārtotu uzlikšanu, ievērojot instrukcijā dotos norādījumus. Mērījumu veikšanas laikā turiet roku vienā līmenī ar sirdi. Veiciet mērījumu uz kailas ādas.

Ierīces kopšana

- Noslaukiet ierīci ar mīkstu ūdenī vai maigā mazgāšanas līdzeklī samitrinātu lupatiņu.
- Nosusiniet ierīci ar papīra dvieli.
- Ierīces tīrīšanai nedrīkst lietot benzīnu vai citus šķīdinātājus.
- Ja ierīce ilgāku laiku netiek lietota – izņemiet no tās baterijas.
- Neglabājiet ierīci temperatūrā, kas ir zemāka par -20°C vai augstāka par + 70°C
- Neglabājiet ierīci mitrās un putekļainās vietās vai vietās kur to var sasniegt tieši saules stari.
- Nekad neveiciet mērījumu, ja ierīce nav nostiprināta uz Jūsu delnas locītavas – tas var radīt neatgriezeniskus bojājumus asinsspiediena mērītāja aplocei.

Uzmanību!

- Ierīce ir paredzēta asinsspiediena mērīšanai tikai pieaugušajiem.

Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu

- Nelietojiet ierīci, ja Jūsu plaukstas locītava ir jebkādā veidā savainota.
- Ja aproces piepūšana netiek pārtraukta –uzreiz atveriet aploci un noņemiet ierīci.

Tehniskie parametri

- Mērījumu diapazons: Spiediens - no 0~300mmHg. Pulss - no 40~199 sitieniem/minūtē
- Mērījumu precizitāte: Spiediens +/- 3mmHg. Pulss +/- 5%
- Atmiņas apjoms: 90 mērījumi
- Ierīces svars: aptuveni 144g (ieskaitot baterijas)
- Baterijas: 2x AAA (1,5V) baterijas

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas, ierīces samirkšanas vai pārslogošanas rezultātā.

Apkārtējās vides aizsardzība



Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku

informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties.

Šīs preces lietošana ir saistīta ar personisko higiēnu.

Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta 5.

apakšpunkts nosaka, ka: “Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;”

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem nr. 689 (Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība), prece netiek klasificēta kā medicīnās **ierīce**.

Importētājvalsts: Polijas republika

2. Universālais asinsspiediena mērītājs ECB-2**Lietošanas instrukcija**Atruna

Šī instrukcija un tajā aprakstītais produkts nav paredzēts kā padomu vai ieteikumu kopums, kas varētu aizstāt ārsta vai cita medicīnas darbinieka konsultāciju vai ieteikumus.

Šeit ietverta informācija nevar izmantot veselības problēmu diagnosticēšanai vai ārstēšanai. Ja Jums ir aizdomas, ka Jums ir veselības problēmas, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu.

Šo produktu ir ieteicams lietot cilvēkiem, kas vecāki par 18 gadiem.

Svarīgi, Lūdzu izlasiet pirms asinsspiediena mērītāja lietošanas!


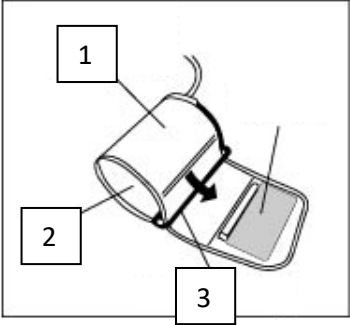
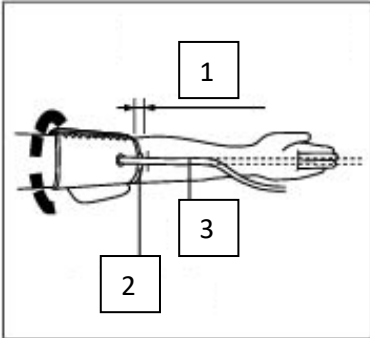
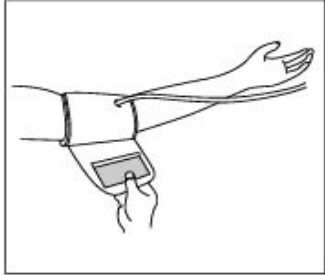
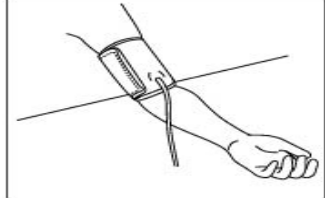
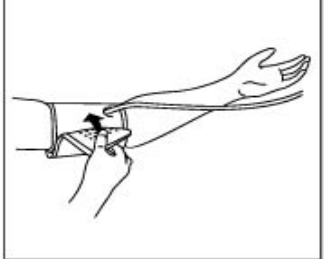
- Pirms asinsspiediena mērīšanas atpūties miera stāvoklī apmēram 5 līdz 10 minūtes.
- Lai asinssvadi atgrieztos iepriekšējā/normālā stāvoklī, atkārtotu mērījumu veiciet ne ātrāk kā pēc 3 līdz 5 minūtēm pēc iepriekšējā mērījuma veikšanas.
- Ja Jums ir kāda sirds-asinssvadu slimība, kā ateroskleroze, diabēts, aknu slimības, nieru slimības, smaga hipertonijs..., lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu pirms lietojat šo ierīci.
- Ja tikko esat lietojis kofeīnu saturošus dzērienus vai smēķējis – nogaidiet 30 līdz 40 minūtes pirms veicat mērījumu.
- Asinsspiediena mērījumu rezultātus var interpretēt tikai kvalificēts ārsts, kas ir pazīstams ar Jūsu slimības vēsturi un veselības stāvokli.
- Kad lietojat asinsspiediena mērītāju, Jūsu delnas locītavai ar asinsspiediena mērītāju ir jābūt tai pašā augstumā kā Jūsu sirdij. Aprocei, ir jābūt stingri apliktai un roka nedrīkst būt, sasprindzināta.
- Mērījuma laikā nekustiniet roku, uz kuras ir uzlikts asinsspiediena mērītājs.
- Asinsspiediena aproce ir jāliek uz kailas rokas, ja starp Jūsu roku ir asinsspiediena mērītāju būs kāds apģērba gabals, mērījums būs nepareizs.
- Cilvēkiem ar asinsrites traucējumiem šis asinsspiediena mērītājs var uzrādīt zemākus lasījumus. Konsultējieties ar savu ārstu, lai noteiktu, vai asinsspiediena mērītāja lasījumi precīzi atspoguļo jūsu faktisko asinsspiedienu.
- Lai iegūtu maksimāli precīzu rezultātu – izmēriet asinsspiedienu 3 reizes pēc kārtas un aprēķiniet rādījumu vidējo vērtību.
- Ar šo ierīci iegūtie rezultāti ir līdzvērtīgi tiem, ko iegūst, klausoties ar stetoskopu, kas ir novietots zem aproces.

Detālu un LCD displejā redzamo simbolu skaidrojums



Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu

Augšdelma aprocas uzlikšana

<p>Kreisajai rokai iekšpusē ar diviem pirkstiem lokalizēt brahiālo artēriju (kas atrodas apmēram 2,5cm virselkoņa) Noteikt, kur pulss ir visspēcīgākais.</p>	
<p>Sagatavojiet aproci, pirms to uzlikt uz rokas, t.i., atbīdiel aproci līdz metāla klipsim.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manžetes virspuse – no plīša; 2. Manžetes iekšpuse – no līdzena auduma; 3. Metāla klipsis. 	
<p>Ievietojiet aprocē kreiso roku. Aprocas apakšējā mala ir jānovieto apmēram 1,5 cm virs elkoņa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakšējai manžetes malai ir jābūt apmēram 1,5cm attālumā no locītavas <i>bedrītes</i> elkoņa iekšpusē; 2. Vads, kas savieno manžeti ar mērierīci; 3. Sekojiet, lai mērījuma veikšanas laikā vads, kas savieno manžeti ar mērierīci nebūtu sagriezies un uz tā nebūtu cilpas. 	
<p>Cieši nostipriniet aproci ar velcro klipsi. Aproce nedrīkst būt uzlikta pārāk vaļīgi/stipri. Jums ir brīvi jāspēj zem aprocas palikt vienu pirkstu.</p>	
<p>Mērījumi ir jāveic sēdus stāvoklī. Roku novietojiet uz galda tā, ka aroce ir vienā līmenī ar Jūsu sirdi.</p>	
<p>Atbrīvojiet roku un pagrieziet to uz augšu. Pārliecinieties vai caurule zem aprocas nav salocījiesies.</p>	

LCD displejā redzamo simbolu apraksts

Simbols	Parādīšanās iemesls	Nepieciešamās darbības
	Simbols parādās un mirgo, kad asinsspiediena mērītājs uztver pulsu plaukstu locītavā.	Tiek veikts mērījums – nekustieties un nesarunājieties.
	Parādās kad bateriju voltāža ir nepietiekama precīza mērījuma veikšanai	Nomainiet baterijas. Pievērsiet uzmanību pareizai bateriju polaritātei.
ER	Parādās kad mērījums nav bijis veiksmīgs.	Skatīt kļūdu skaidrojumu sarakstu (<i>skat.zemāk</i>).

Mērījumu veikšana

- Ievietojiet baterijas:
 - Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet baterijas pareizā polaritātē.
- Bateriju maiņa

Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu, izņemiet vecās un ielieciet jaunas baterijas. Esiet uzmanīgi! Baterijas ir jāievieto pareizā polaritātē, citādi ierīce var tiks sabojāta. Lai baterijas ievietotu pareizi, vērīgi aplūkojiet bateriju nodalījumu. Polaritātes (+ / -) ikonas ir norādītas.

Veikt mērījumus Jūs varat gan izmantojot tikai baterijas, gan izmantojot elektriskās strāvas adapteri (*nav iekļauts komplektā*).

- Datuma un laika iestatīšana:

Pirms uzsākat mērījumu veikšanu un saglabāšanu, nepieciešams iestatīt pareizi laiku. Pārlicinieties, ka ierīce ir **IZSLĒGTA** pirms uzsākat datuma/laika iestatīšanu. Nospiediet pogu **SET**. Uz ekrāna uzrādīsies mirgojošs noklusējuma gads. Ar pogu **MEM** uzstādiat attiecīgo gadu un apstipriniet to nospiežot pogu **SET**. Atkārtojiet šo procesu ar mēnesi, datumu un diennakts laiku – stundas, minūtes.
- Asinsspiediena mērīšana:
 - Uzlieciet asinsspiediena mērītāju uz augšdelma, kā aprakstīts iepriekš.
 - Apsēdieties pareizā mērījuma veikšanas pozīcijā, kā aprakstīts iepriekš.
 - Nospiediet „Ieslēgt / Izslēgt” podziņu. Displejā sāk mirgot simboli un aprocē automātiski tiek iepildīts gaiss nepieciešamajā daudzumā, lai ierīce var veikt nepieciešamos mērījumus. Mērot asinsspiedienu nekustiniet roku.
 - Kad aprocē ir sasniegts nepieciešamais spiediens, tas sāk pamazām samazināties. Kad tiek uztverts pulss – sirds simbols displejā sāk mirgot.


LCD displejā būs redzami sekojoši mērījuma rezultāti: Sistoliskais (augšējais) asinsspiediens, Diastoliskais (apakšējais) asinsspiediens, Pulss un Riska grupas indikācija (Jo augstāks ir jūsu asinsspiediens, jo augstāka būs indikatora kolona).

- Mērījuma rezultātu saglabāšana, iepriekš veikto mērījumu rezultātu apskatīšana un dzēšana:

Mērījuma rezultātu saglabāšana. Pēc katra mērījuma veikšanas tiek automātiski saglabāti dati par sistolisko asinsspiedienu, diastolisko asinsspiedienu un sirds ritmu, mērījuma datumu un laiku. Vienai personai datu bāzē tiek uzglabāti 60 mērījumi, ja tiek veikti vairāk par 60 mērījumiem, agrāk veiktie mērījumi tiek automātiski izdzēsti.
- Iepriekš veikto mērījumu rezultātu apskatīšana:
 - Pārlicinieties, ka ierīce ir izslēgta. Nospiediet „MEM” podziņu, lai izsauktu apskates režīmu.

Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu

- Spiežot pogu **MEM/SET**, aptuveni 1 sekundi uzrādās divi skaitļi – augšējā vērtība ir attiecīgā mērījuma kārtas numurs; apakšējā vērtība ir kopējais atmiņā saglabāto mērījumu skaits.
- Nospiediet „START/STOP” podziņu, lai pārslēgtos uz pamata režīmu.
- Mērījuma rezultātu dzēšana:
 - Izņemiet baterijas no asinsspiediena mērītāja un visi dati no atmiņas tūlīt tiks izdzēsti.
 - Lai pārbaudītu vai dati tiešām ir izdzēsti, ielieciet baterijas un nospiediet „MEM” podziņu – ja dati neparādās – tie ir veiksmīgi izdzēsti.
- Bateriju nomaiņa:
 - Ja displejā parādās ikona  Baterija ir tukša. Aizstājiet esošās baterijas ar jaunām. Lietojiet tikai viena veida baterijas, izmantojot dažāda veida baterijas, Jūs varat bojāt ierīci.
 - Neizmantojiet jaunas un vecas baterijas vienlaicīgi.
- Kļūdu skaidrojumi:

KĻŪDA	PROBLĒMA	IESPĒJAMĀS RISINĀJUMS
Er4 ; Er0	Nepareiza iekārtas kalibrācija	Sazinieties ar ražotāju/izplatītāju
Er2	Nepareizs mērījuma rezultāts	Nekustiniet aproci/ierīci/roku/pārējo ķermeni mērījuma veikšanas laikā. Nesarunājieties, nešķaudat un neklepojat mērījuma veikšanas laikā. Savelciet aproci ciešāk, ja nepieciešams. Pārliedzinieties, ka manžetes caurule ir kārtīgi ievietota ierīcē. Uzgaidiet vismaz 3 minūtes līdz nākamā mērījuma veikšanai.
Er30	Aproce ir pārāk vaļīga	Savelciet aproci ciešāk. Pārliedzinieties, ka manžetes caurule ir kārtīgi ievietota ierīcē.
LO	Bateriju uzlādes līmenis ir pārāk mazs	Ievietojiet jaunas baterijas
LO	Pazemināta gaisa cirkulācija	Savelciet aproci ciešāk. Pārliedzinieties, ka manžetes caurule ir kārtīgi ievietota ierīcē.

Ierīces kopšana

- Noslaukiet ierīci ar mīkstu ūdenī vai maigā mazgāšanas līdzeklī samitrinātu lupatiņu.
- Nesusiniet ierīci ar papīra dvieli.
- Ierīces tīrīšanai nedrīkst lietot benzīnu vai citus šķīdinātājus.
- Ja ierīce ilgāku laiku netiek lietota – izņemiet no tās baterijas.
- Neglabājiet ierīci temperatūrā, kas ir zemāka par -20°C vai augstāka par + 50°C
- Neglabājiet ierīci mitrās un puteklainās vietās vai vietās kur to var sasniegt tieši saules stari.
- Nekad neveiciet mērījumu, ja ierīce nav nostiprināta uz Jūsu delnas locītavas – tas var radīt neatgriezeniskus bojājumus asinsspiediena mērītāja aplocei.
- **Uzmanību!**
- Nelietojiet ierīci, ja Jūsu roka ir jebkādā veidā savainota.

Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu

- Ja aploces piepūšana netiek pārtraukta – uzreiz atveriet aploci un noņemiet ierīci.

Tehniskie parametri

- Mērīšanas metode: Oscilometriskā.
- Mērījumu diapazons: Spiediens - no 0~300mmHg. Pulss - no 40~199 sitieniem/minūtē.
- Mērījumu precizitāte: Spiediens +/- 3mmHg. Pulss +/- 5%.
- Spiediena samazināšana aprocē: automātiska.
- Displejs: LCD (Digitālais šķidrā kristāla displejs).
- Mērīšana: sistoliskais spiediens, diastoliskais asinsspiediens, sirdsdarbības ritms.
- Atmiņas apjoms: 90 mērījumi.
- Ierīces svars: aptuveni 335g (ieskaitot baterijas).
- Aproces izmēri: 23 – 33 cm.
- Darba temperatūra: 10° C līdz+40 °C.
- Darbības relatīvais mitrums:30-85%.
- Uzglabāšanas temperatūra: -20° C līdz+50 °C.
- Uzglabāšanas relatīvais mitrums:15-95%.
- Barošana: 4xAAA baterijas vai AC 6V adapteris (*nav iekļauts komplektā*).
- Baterijas darbības ilgums: aptuveni 300 mērījumiem (mēra 2 reizes dienā).
- Komplektā: Asinsspiediena mērītājs, caurule ar aproci, instrukcija.

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā.

Šīs preces lietošana ir saistīta ar personisko higiēnu.

Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta 5.

apakšpunkts nosaka, ka: “Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;”

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem nr. 689 (Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība), prece netiek klasificēta kā medicīnās ierīce.

Importēts no Polijas Republikas

3. Stacionārais asinsspiediena mērītājs ECB-3 Lietošanas instrukcija

Atruna

Šī instrukcija un tajā aprakstītais produkts nav paredzēts kā padomu vai ieteikumu kopums, kas varētu aizstāt ārsta vai cits medicīnas darbinieka konsultāciju vai ieteikumus.


Šeit ietvertu informāciju nevar izmantot veselības problēmu diagnosticēšanai vai ārstēšanai. Ja Jums ir aizdomas, ka Jums ir veselības problēmas, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu.

Šo produktu ir ieteicams lietot cilvēkiem, kas vecāki par 18 gadiem.

Svarīgi, Lūdzu izlasiet pirms asinsspiediena mērītāja lietošanas!

- Pirms asinsspiediena mērīšanas atpūties miera stāvoklī apmēram 5 līdz 10 minūtes.
- Lai asinssvadi atgrieztos iepriekšējā/normālā stāvoklī, atkārtotu mērījumu veiciet ne ātrāk kā pēc 3 līdz 5 minūtēm pēc iepriekšējā mērījuma veikšanas.
- Ja Jums ir kāda sirds-asinssvadu slimība, kā ateroskleroze, diabēts, aknu slimības, nieru slimības, smaga hipertonijs..., lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu pirms lietojat šo ierīci.
- Ja tikko esat lietojis kofeīnu saturošus dzērienus vai smēķējis – nogaidiet 30 līdz 40 minūtes pirms veicat mērījumu.
- Asinsspiediena mērījumu rezultātus var interpretēt tikai kvalificēts ārsts, kas ir pazīstams ar Jūsu slimības vēsturi un veselības stāvokli.
- Kad lietojat asinsspiediena mērītāju, Jūsu delnas locītavai ar asinsspiediena mērītāju ir jābūt tai pašā augstumā kā Jūsu sirdij. Aprocei, ir jābūt stingri apliktai un roka nedrīkst būt, sasprindzināta.
- Mērījuma laikā nekustiniet roku, uz kuras ir uzlikts asinsspiediena mērītājs.
- Asinsspiediena aproce ir jāliek uz kailas rokas, ja starp Jūsu roku ir asinsspiediena mērītāju būs kāds apģērba gabals, mērījums būs nepareizs.
- Cilvēkiem ar asinsrites traucējumiem šis asinsspiediena mērītājs var uzrādīt zemākus lasījumus. Konsultējieties ar savu ārstu, lai noteiktu, vai asinsspiediena mērītāja lasījumi precīzi atspoguļo jūsu faktisko asinsspiedienu.
- Lai iegūtu maksimāli precīzu rezultātu – izmēriet asinsspiedienu 3 reizes pēc kārtas un aprēķiniet rādījumu vidējo vērtību.
- Ar šo ierīci iegūtie rezultāti ir līdzvērtīgi tiem, ko iegūst, klausoties ar stetoskopu, kas ir novietots zem aproces.


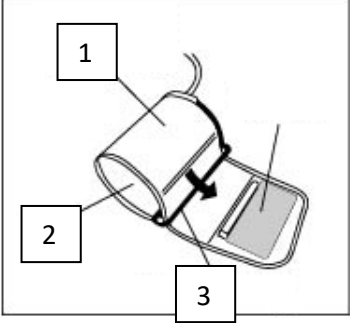
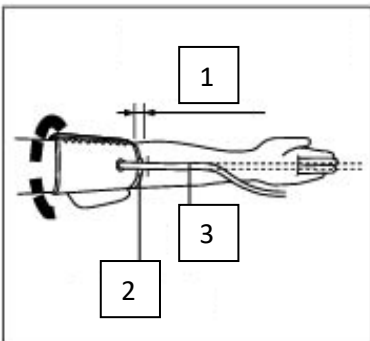
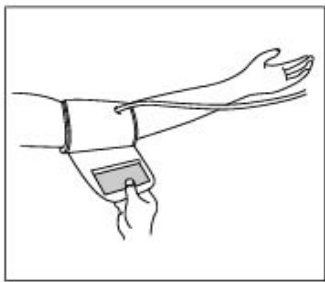
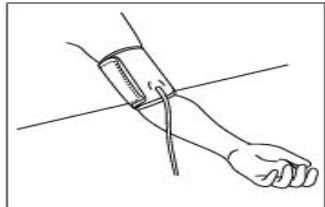
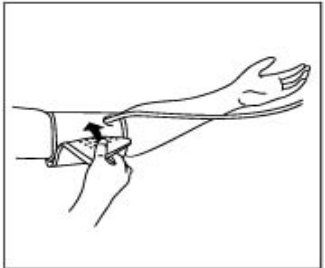
Detālu un LCD displejā redzamo simbolu skaidrojums

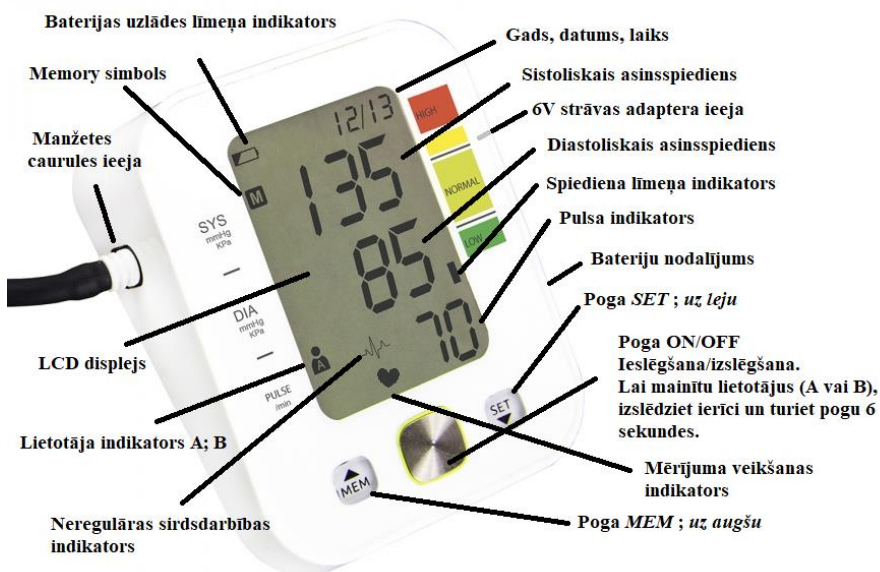

Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu



Augšdelma aprocas uzlikšana

<p>Kreisajai rokai iekšpusē ar diviem pirkstiem lokalizēt brahiālo artēriju (kas atrodas apmēram 2,5cm virselkoņa) Noteikt, kur pulss ir visspēcīgākais.</p>	
<p>Sagatavojiet aproci, pirms to uzlikt uz rokas, t.i., atbīdīet aproci līdz metāla klipsim.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manžetes virspuse – no plīša; 2. Manžetes iekšpuse – no līdzena auduma; 3. Metāla klipsis. 	
<p>Ievietojiet aprocē kreiso roku. Aprocas apakšējā mala ir jānovieto apmēram 1,5 cm virs elkoņa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakšējai manžetes malai ir jābūt apmēram 1,5cm attālumā no locītavas <i>bedrītes</i> elkoņa iekšpusē; 2. Vads, kas savieno manžeti ar mērierīci; 3. Sekojiet, lai mērījuma veikšanas laikā vads, kas savieno manžeti ar mērierīci nebūtu sagriezies un uz tā nebūtu cilpas. 	
<p>Cieši nostipriniet aproci ar velcro klipsi. Aproce nedrīkst būt uzlikta pārāk vaļīgi/stipri. Jums ir brīvi jāspēj zem aprocas palikt vienu pirkstu.</p>	
<p>Mērījumi ir jāveic sēdus stāvoklī. Roku novietojiet uz galda tā, ka aroce ir vienā līmenī ar Jūsu sirdi.</p>	
<p>Atbrīvojiet roku un pagrieziet to uz augšu. Pārliecinieties vai caurule zem aprocas nav salocījies.</p>	

LCD displejā redzamo simbolu apraksts

Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu

Simbols	Parādīšanās iemesls	Nepieciešamās darbības
	Simbols parādās un mirgo, kad asinsspiediena mērītājs uztver pulsu plaukstu locītavā.	Tiek veikts mērījums – nekustieties un nesarunājieties.
	Parādās kad bateriju voltāža ir nepietiekama precīza mērījuma veikšanai	Nomainiet baterijas. Pievērsiet uzmanību pareizai bateriju polaritātei.
ER	Parādās kad mērījums nav bijis veiksmīgs.	Skatīt kļūdu skaidrojumu sarakstu (<i>skat.zemāk</i>).

Mērījumu veikšana

- Ievietojiet baterijas:
 - Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet baterijas pareizā polaritātē.
- Bateriju maiņa

Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu, izņemiet vecās un ielieciet jaunas baterijas. Esiet uzmanīgi! Baterijas ir jāievieto pareizā polaritātē, citādi ierīce var tiks sabojāta. Lai baterijas ievietotu pareizi, vērīgi aplūkojiet bateriju nodalījumu. Polaritātes (+ / -) ikonas ir norādītas.

Veikt mērījumus Jūs varat gan izmantojot tikai baterijas, gan izmantojot elektriskās strāvas adapteri (*nav iekļauts komplektā*).

- Datuma un laika iestatīšana:

Pirms uzsākat mērījumu veikšanu un saglabāšanu, nepieciešams iestatīt pareizi laiku. Pārlicinieties, ka ierīce ir **IZSLĒGTA** pirms uzsākat datuma/laika iestatīšanu. Nospiediet un turiet vidējo metālisko **ON/OFF** pogu, līdz ierīce ieslēdzas. Ierīce sākotnēji uz ekrāna uzrādīs visas iespējamās displeja vērtības. Turpiniet turēt pogu līdz uz ekrāna uzrādās tikai lietotāja indikators un datums. Nospiediet pogu **SET**. Uz ekrāna uzrādīsies mirgojošs noklusējuma gads 2017. Ar pogu **MEM** uzstādiat attiecīgo gadu un apstipriniet to nospiežot pogu **SET**. Atkārtojiet šo procesu ar mēnesi, datumu un diennakts laiku – stundas, minūtes.
- Asinsspiediena mērīšana:
 - Uzlieciet asinsspiediena mērītāju uz augšdelma, kā aprakstīts iepriekš.
 - Apsēdieties pareizā mērījuma veikšanas pozīcijā, kā aprakstīts iepriekš.
 - Nospiediet „Ieslēgt / Izslēgt” podziņu. Displejā sāk mirgot simboli un aprocē automātiski tiek iepildīts gaiss nepieciešamajā daudzumā, lai ierīce var veikt nepieciešamos mērījumus. Mērot asinsspiedienu nekustiniet roku.
 - Kad aprocē ir sasniegts nepieciešamais spiediens, tas sāk pamazām samazināties. Kad tiek uztverts pulss – sirds simbols displejā sāk mirgot.

LCD displejā būs redzami sekojoši mērījuma rezultāti: Sistoliskais (augšējais) asinsspiediens, Diastoliskais (apakšējais) asinsspiediens, Pulss un Riska grupas indikācija (Jo augstāks ir jūsu asinsspiediens, jo augstāka būs indikatora kolona).


Jūsu ērtībai uz Asinsspiediena mērītāja korpusa ir riska grupu indikācijas skala:

1. Dzeltēnā josla - Sistoliskais (augšējais) asinsspiediens 110 un Diastoliskais (apakšējais) asinsspiediens lielāks par 85.
 2. Sarkanā josla - Sistoliskais (augšējais) asinsspiediens 181 un Diastoliskais (apakšējais) asinsspiediens lielāks par 85.
- Mērījuma rezultātu saglabāšana, iepriekš veikto mērījumu rezultātu apskatīšana un dzēšana:

Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu

Mērījuma rezultātu saglabāšana. Pēc katra mērījuma veikšanas tiek automātiski saglabāti dati par sistolisko asinsspiedienu, diastolisko asinsspiedienu un sirds ritmu, mērījuma datumu un laiku. Vienai personai datu bāzē tiek uzglabāti 60 mērījumi, ja tiek veikti vairāk par 60 mērījumiem, agrāk veiktie mērījumi tiek automātiski izdzēsti.

- iepriekš veikto mērījumu rezultātu apskatīšana:
 - Nospiediet „MEM” podziņu, lai izsauktu apskates režīmu.
 - Nospiediet „uz leju” Vai „uz augšu” podziņu, lai izvēlētos nepieciešamo mērījuma kārtas numuru.
 - Nospiediet „START/STOP” podziņu, lai pārslēgtos uz pamata režīmu.
 - Nospiežot un turot pogu 2 sekundes, pirmais mērījums, kas uzrādīsies būs ar AVG simbolu – tas ir vidējais mērījums, kas ir balstīts uz pēdējiem trim mērījumiem.
- Mērījuma rezultātu dzēšana:
 - Izņemiet baterijas no asinsspiediena mērītāja un visi dati no atmiņas tūlīt tiks izdzēsti.
 - Lai pārbaudītu vai dati tiešām ir izdzēsti, ielieciet baterijas un nospiediet „MEM” podziņu – ja dati neparādās – tie ir veiksmīgi izdzēsti.
- Bateriju nomaiņa:
 - Ja displejā parādās ikona  Baterija ir tukša. Aizstājiet esošās baterijas ar jaunām. Lietojiet tikai viena veida baterijas, izmantojot dažāda veida baterijas, Jūs varat bojāt ierīci.
 - Neizmantojiet jaunas un vecas baterijas vienlaicīgi.
- Lietotāja maiņa:
 - Ierīce saglabā mērījumus diviem lietotājiem – A un B. Pēc noklusējuma ierīce mērījumus saglabā lietotājam A. Lai pārslēgtos uz lietotāju B, spiedien ON/OFF pogu un turiet to 6 sekundes, līdz lietotāja indikatora ikona pārslēdzas uz B
- Kļūdu skaidrojumi:

KĻŪDA	PROBLĒMA	IESPĒJAMĀS RISINĀJUMS
Er4	LCD displejā neuzrādās 0	Nekustiniet aproci/roku/pārējo ķermeni mērījuma veikšanas laikā
Er2	Nepareizs mērījuma rezultāts	Nekustiniet aproci/roku/pārējo ķermeni mērījuma veikšanas laikā. Savelciet aproci ciešāk. Pārliedzieties, ka manžetes caurule ir kārtīgi ievietota ierīcē. Uzgaidiet vismaz 3 minūtes līdz nākamā mērījuma veikšanai
Er30	Aproce ir pārāk vaļīga	Savelciet aproci ciešāk. Pārliedzieties, ka manžetes caurule ir kārtīgi ievietota ierīcē.
LO	Bateriju uzlādes līmenis ir pārāk mazs	Ievietojiet jaunas baterijas
LO	Pazemināta gaisa cirkulācija	Savelciet aproci ciešāk. Pārliedzieties, ka manžetes caurule ir kārtīgi ievietota ierīcē.

Ierīces kopšana

- Noslaukiet ierīci ar mīkstu ūdenī vai maigā mazgāšanas līdzeklī samitrinātu lupatiņu.
- Nosusiniet ierīci ar papīra dvieli.
- Ierīces tīrīšanai nedrīkst lietot benzīnu vai citus šķīdinātājus.

Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu

- Ja ierīce ilgāku laiku netiek lietota – izņemiet no tās baterijas.
- Neglabājiet ierīci temperatūrā, kas ir zemāka par -20°C vai augstāka par + 50°C
- Neglabājiet ierīci mitrās un putekļainās vietās vai vietās kur to var sasniegt tieši saules stari.
- Nekad neveiciet mērījumu, ja ierīce nav nostiprināta uz Jūsu delnas locītavas – tas var radīt neatgriezeniskus bojājumus asinsspiediena mērītāja aplocei.

Uzmanību!

- Nelietojiet ierīci, ja Jūsu roka ir jebkādā veidā savainota.
- Ja aploces piepūšana netiek pārtraukta – uzreiz atveriet aploci un noņemiet ierīci.

Tehniskie parametri

- Mērīšanas metode: Oscilometriskā.
- Mērījumu diapazons: Spiediens - no 0~300mmHg. Pulss - no 40~199 sitieniem/minūtē.
- Mērījumu precizitāte: Spiediens +/- 3mmHg. Pulss +/- 5%.
- Spiediena samazināšana aprocē: automātiska.
- Displejs: LCD (Digitālais šķidrā kristāla displejs).
- Mērīšana: sistoliskais spiediens, diastoliskais asinsspiediens, sirdsdarbības ritms.
- Atmiņas apjoms: 60+60 mērījumi.
- Ierīces svars: aptuveni 335g (ieskaitot baterijas).
- Aproces izmēri: 23 – 33 cm.
- Darba temperatūra: 10° C līdz+40 °C.
- Darbības relatīvais mitrums:30-85%.
- Uzglabāšanas temperatūra: -20° C līdz+50 °C.
- Uzglabāšanas relatīvais mitrums:15-95%.
- Barošana: 4xAAA baterijas vai DC 6V adapteris (*nav iekļauts komplektā*).
- Baterijas darbības ilgums: aptuveni 300 mērījumiem (mēra 2 reizes dienā).
- Komplektā: Asinsspiediena mērītājs, caurule ar aproci, instrukcija.

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā.

Šīs preces lietošana ir saistīta ar personisko higiēnu.

Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta 5.

apakšpunkts nosaka, ka: “Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;”

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem nr. 689 (Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība), prece netiek klasificēta kā medicīnās ierīce.

Importēts no Polijas Republikas

Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu